



Guia de Instalação





É uma solução que une tecnologia e engajamento para ajudar os Centros de Imagem a proporcionar uma experiência única na jornada da gestação de seus pacientes.

Através do que há de mais moderno em tecnologia de dados, com V-Baby as primeiras imagens do bebê são transmitidas ao vivo e gravadas diretamente na nuvem, podendo ser compartilhadas em qualquer lugar do mundo pelo celular, tablet ou computador.

Índice

- ▶ Especificação técnica
- ▶ Download
- ▶ Instalação do V-Baby Desktop
- ▶ Acessando o V-Baby Desktop pela primeira vez
- ▶ Configurando o V-Baby Desktop
- ▶ Realizando uma Gravação de exame
- ▶ Histórico de Gravações
- ▶ Status das Gravações
- ▶ Acessando o Dashboard
- ▶ Encerrando a sessão
- ▶ Atualização



Especificação técnica

O V-Baby Desktop é a junção de sistemas já existentes (Sync e V-Lab Client). O instalador é um MSI (Microsoft System Installer), arquivos (.ts, .m3u8) vão pro diretório temporário do windows.

Download do V-Baby Desktop

Os procedimentos a seguir para download e instalação serão exemplificados com base no Sistema operacional Windows e navegador Chrome.

Acesse a página da V-Lab para efetuar o download do V-Baby Desktop para o seu computador. [Clique aqui](#)



The screenshot displays the V-Lab website's interface for downloading the V-Baby Desktop software. At the top left is the 'v.lab' logo. At the top right, there is a navigation menu with the word 'Instalação' and a blue 'DOWNLOAD' button. The main content area features a large light blue diagonal graphic. On the left side of this graphic, the heading 'Download V-Baby Desktop' is followed by a paragraph: 'V-Baby Desktop é uma solução completa desenvolvida para revolucionar os processos de gravação, transmissão e armazenamento de exames de ultrassom.' Below this, a smaller line of text states: 'Se você é cliente V-Lab, faça aqui o download.' At the bottom left of the main content area is a blue button with the Windows logo and the text 'DOWNLOAD PARA WINDOWS'. On the right side, there is a composite image: the top part shows a medical monitor displaying an ultrasound scan, and the bottom part shows a female doctor in a white coat sitting at a desk, working on a laptop. To the right of the doctor, there is a vertical strip of several small ultrasound images.


Para iniciar o download, siga o procedimento abaixo:

- 1 ▶ Clique no botão **Download para Windows**




Download para Windows

- 2 ▶ Visualize o status do download na pasta de downloads do seu navegador, no Chrome: `chrome://downloads/`

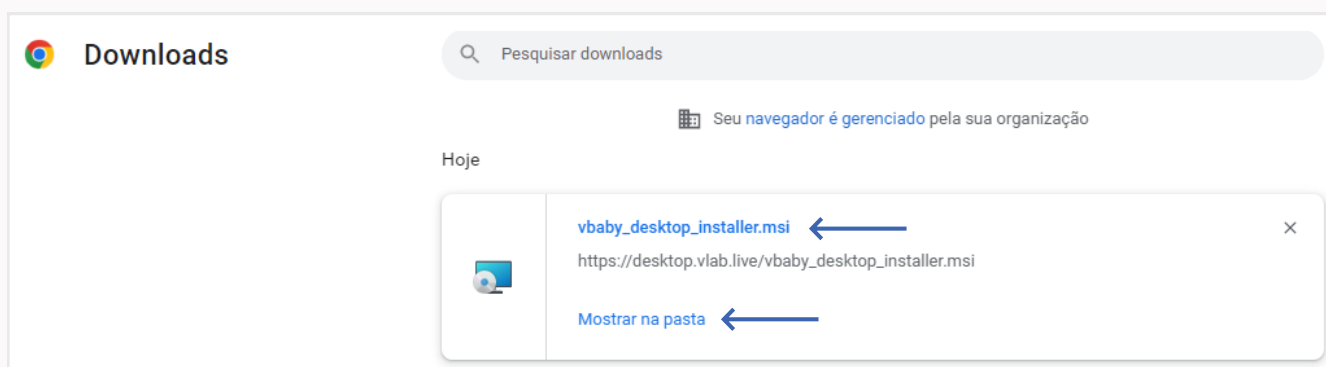


- 3 ▶ Na pasta de downloads do seu computador, você irá encontrar o instalador do V-Baby

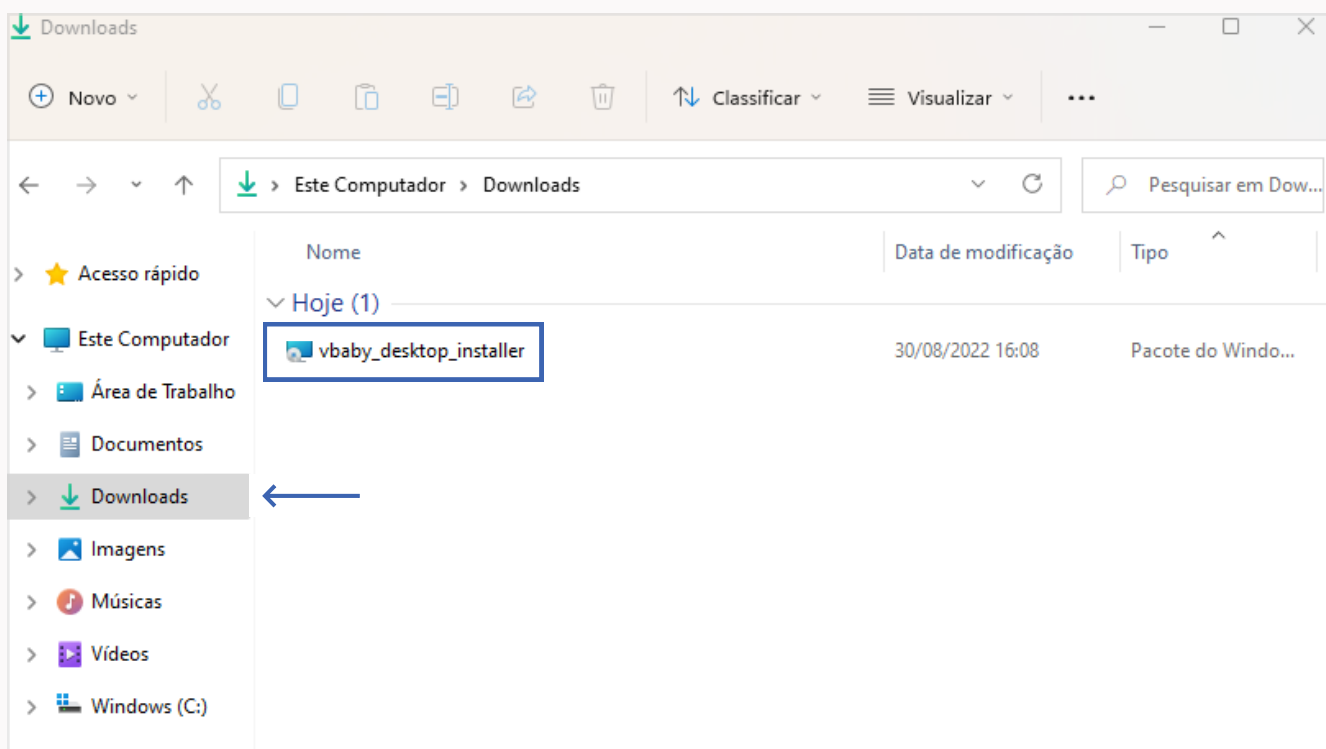


Instalação do V-Baby Desktop

Para iniciar a instalação, siga o procedimento abaixo:


- 1 ▶ Com dois cliques no download realizado no passo anterior, será iniciado o instalador

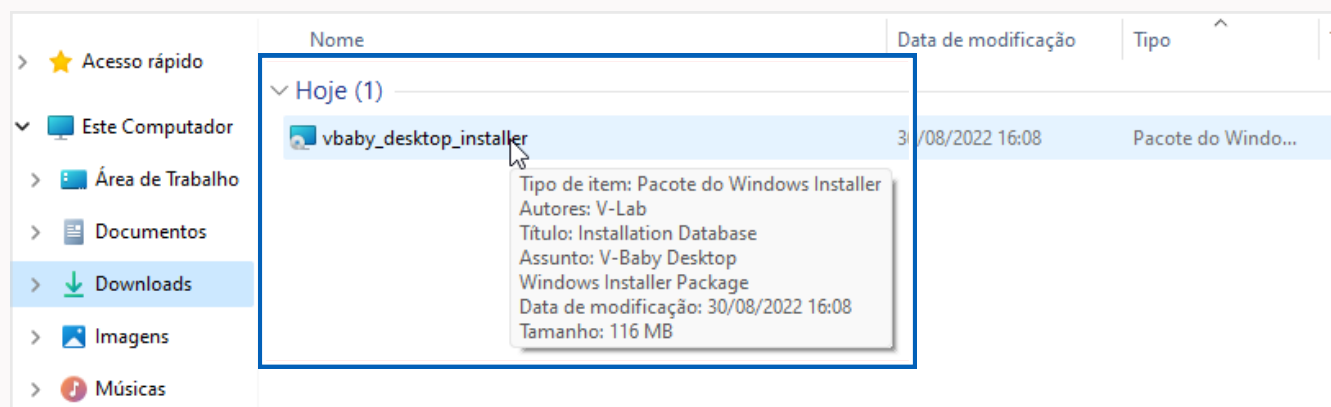

- 2 ▶ O instalador iniciará com “Bem vindo ao Assistente para Instalação”, clique em **Avançar** para continuar com a instalação

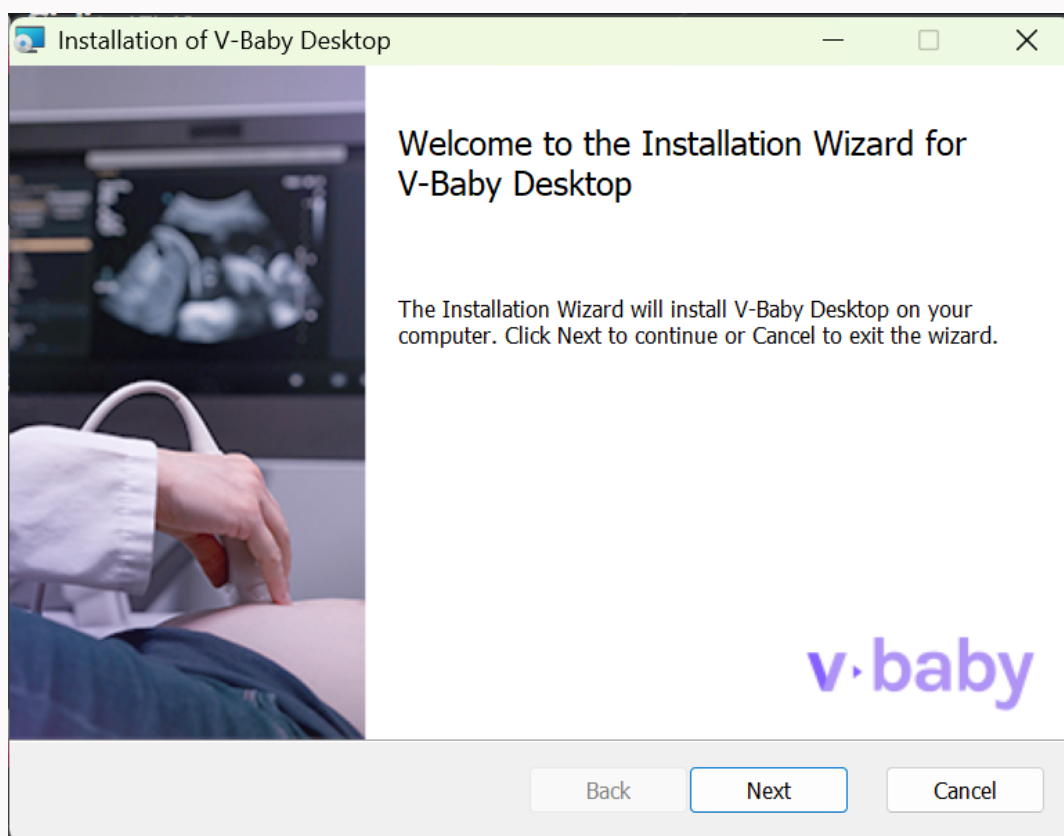


- 3 ▶ Após a iniciação do assistente, será exibida a tela com os termos de uso do software. É importante ler atentamente para aceitar os termos. Marque opção **Aceito** e clique em **Avançar**

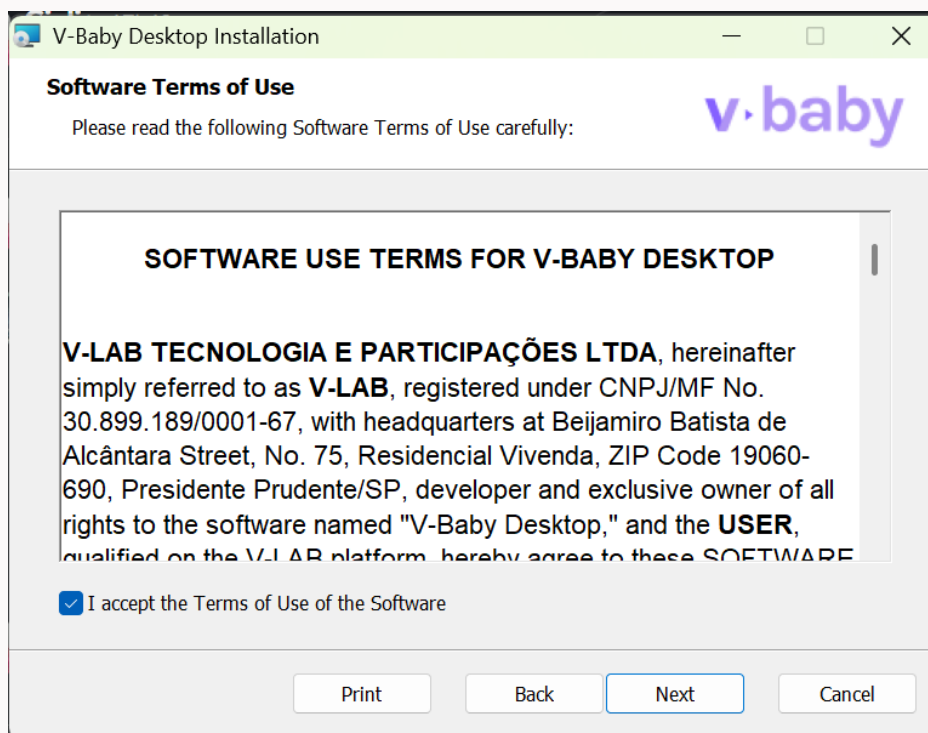


- 4 ▶ Nesse passo você seleciona a pasta de instalação do V-Baby Desktop. O instalador já indica um local para instalação no C:\


Importante: o usuário do computador precisa ter acesso a essa pasta para concluir a instalação e utilização do V-Baby Desktop

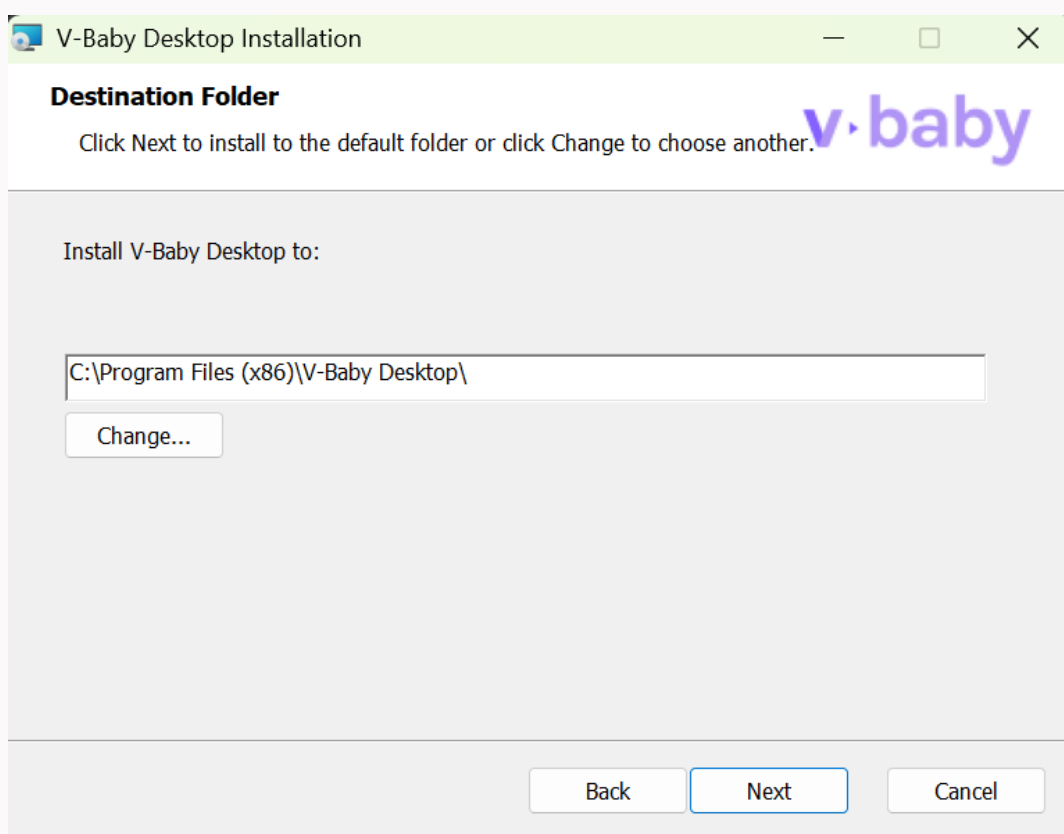


- 5 ▶ Agora o assistente está pronto para iniciar a instalação, clique em **Instalar**

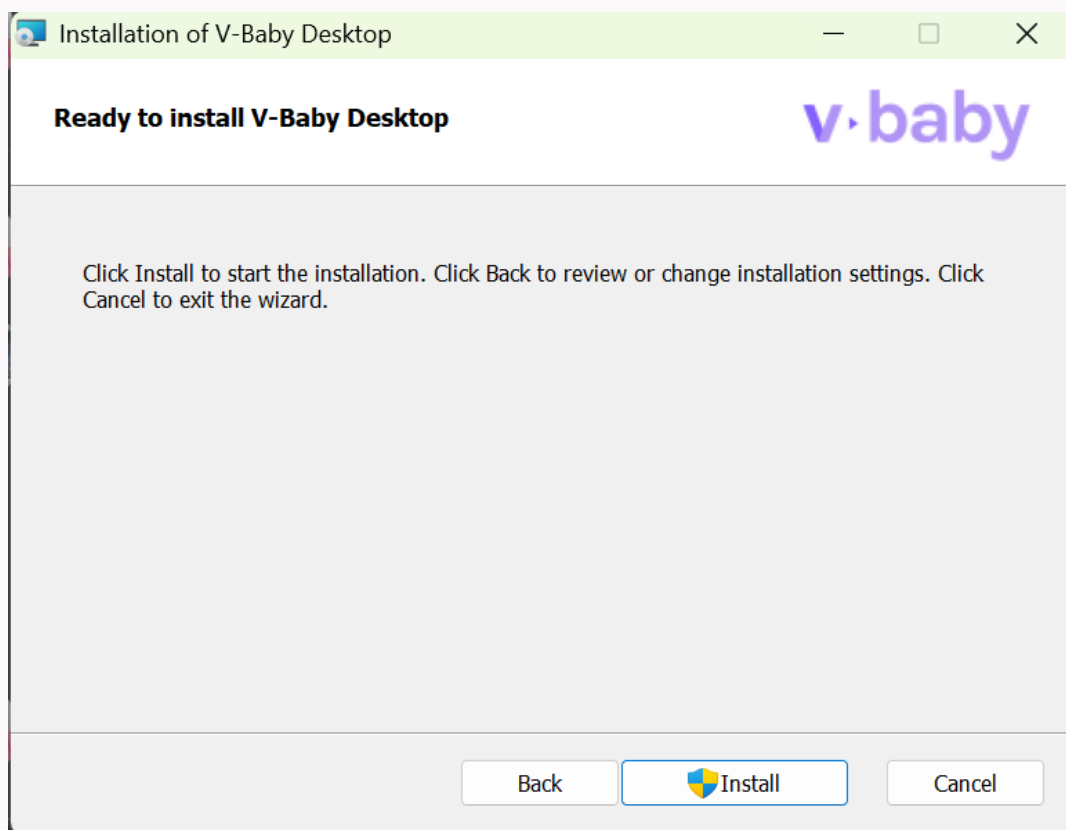

- 6 ▶ Será exibida a tela com o processo de instalação do V-Baby desktop. É uma instalação rápida de no máximo 2 minutos

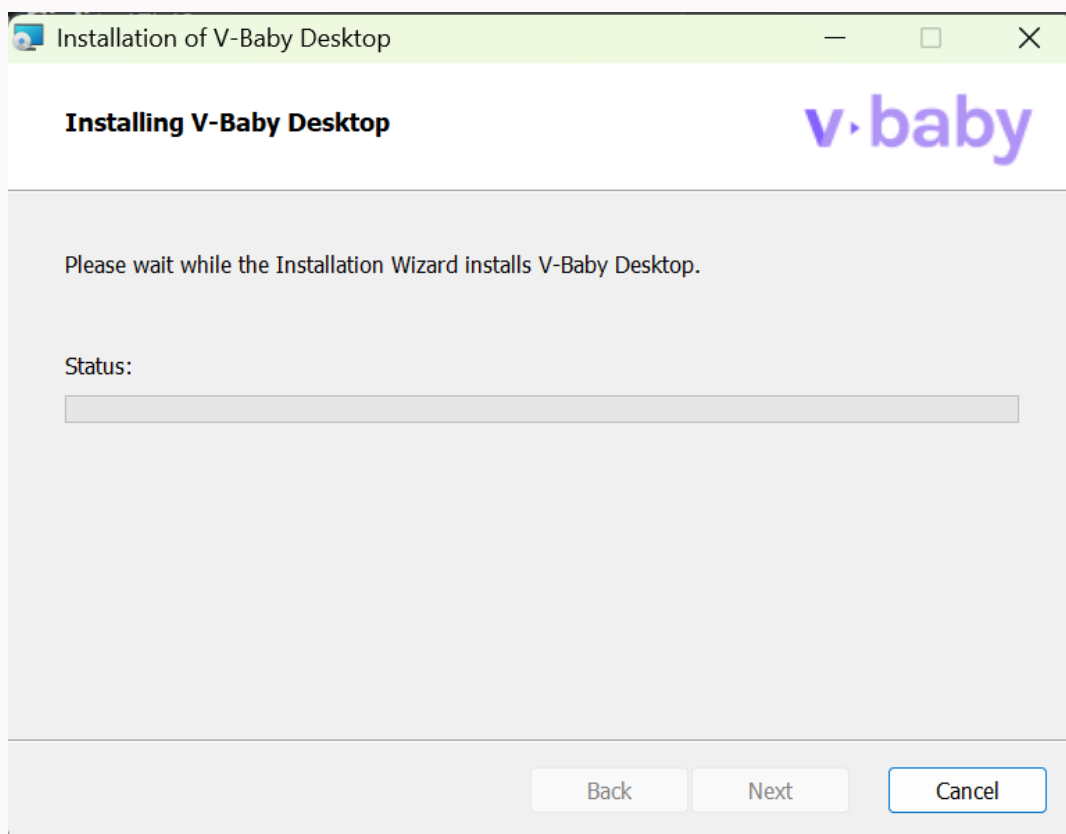


7 ▶ Pronto! O seu V-Baby Desktop foi instalado com sucesso

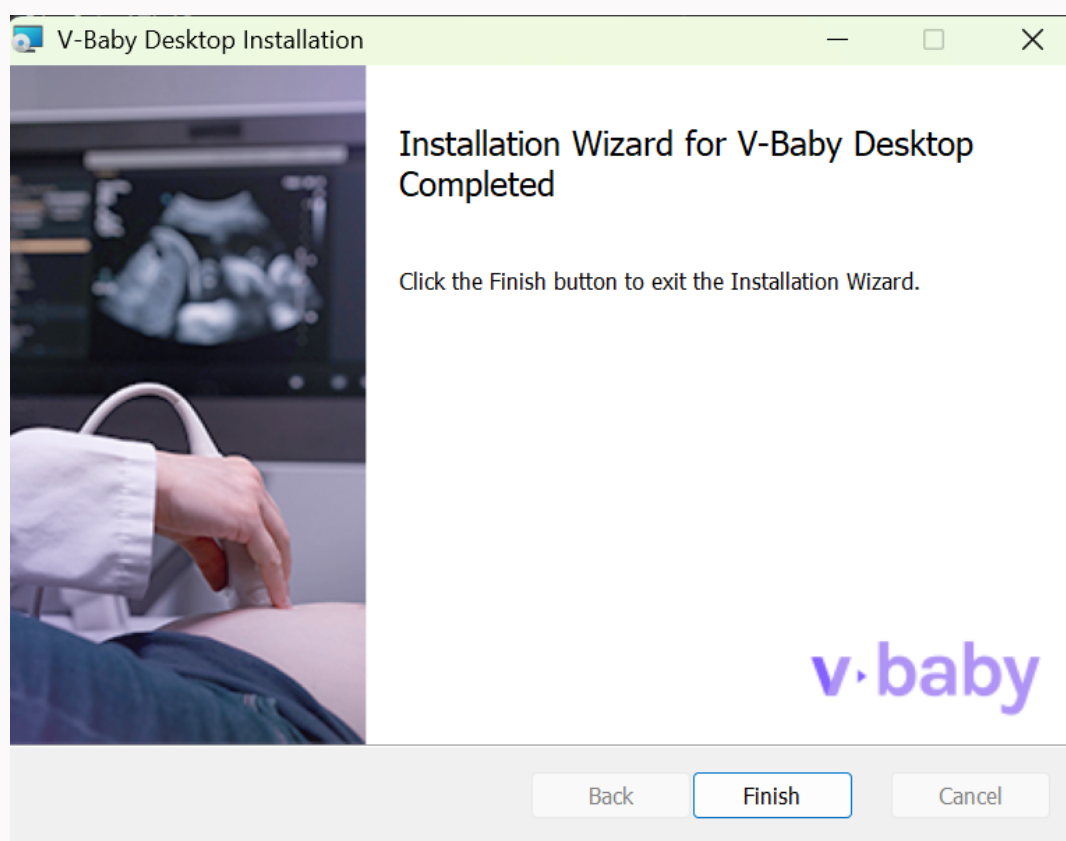

Acessando o V-Baby Desktop pela 1ª vez

- ▶ Um atalho do V-Baby Desktop foi adicionado na área de trabalho do seu computador; você também pode acessá-lo direto na pasta onde foi realizada a instalação

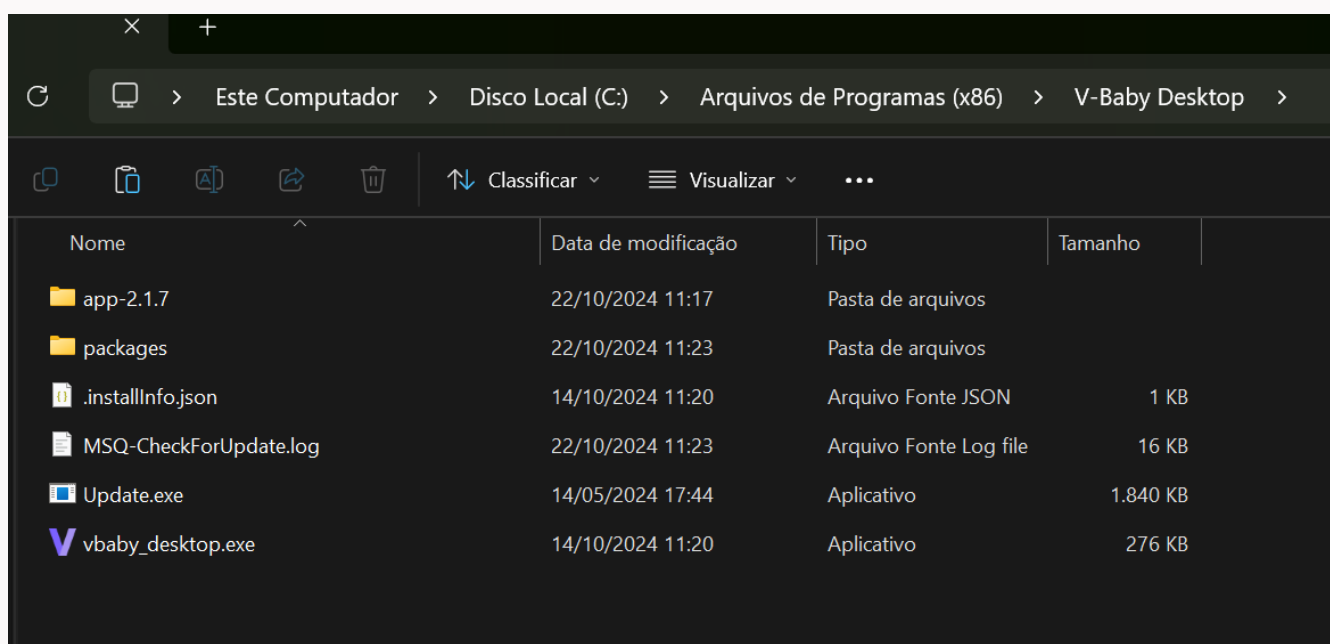


- 2 ▶ Ao iniciar pela primeira vez o V-Baby Desktop, será necessário inserir os seus dados de acesso:

Login

Senha

Chave de acesso

Caso ainda não tenha, solicite a equipe de suporte da Vlab

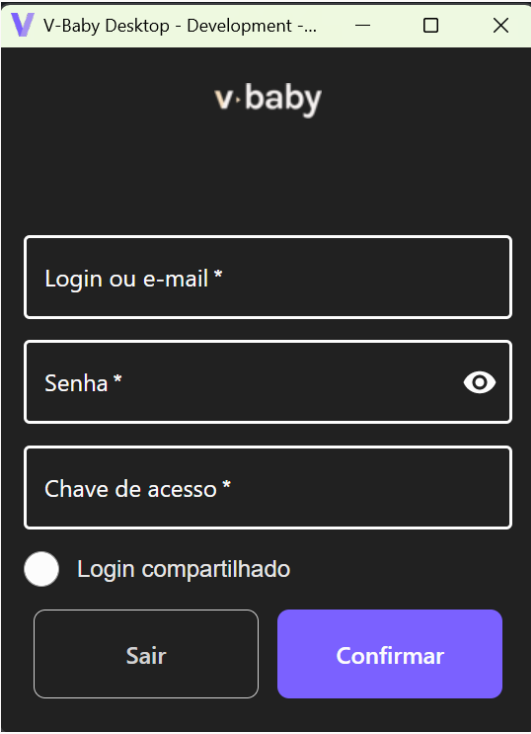
A screenshot of the V-Baby Desktop login window. The window title is "V-Baby Desktop - Development - ...". The interface is dark-themed with the "v·baby" logo at the top. It features three input fields: "Login ou e-mail *", "Senha *" (with an eye icon for toggling visibility), and "Chave de acesso *". Below these fields is a radio button labeled "Login compartilhado". At the bottom are two buttons: "Sair" and "Confirmar".

- 3 ▶ O V-Baby desktop apresenta o menu lateral com as opções de:

+ Nova gravação


Gravações

Configurações

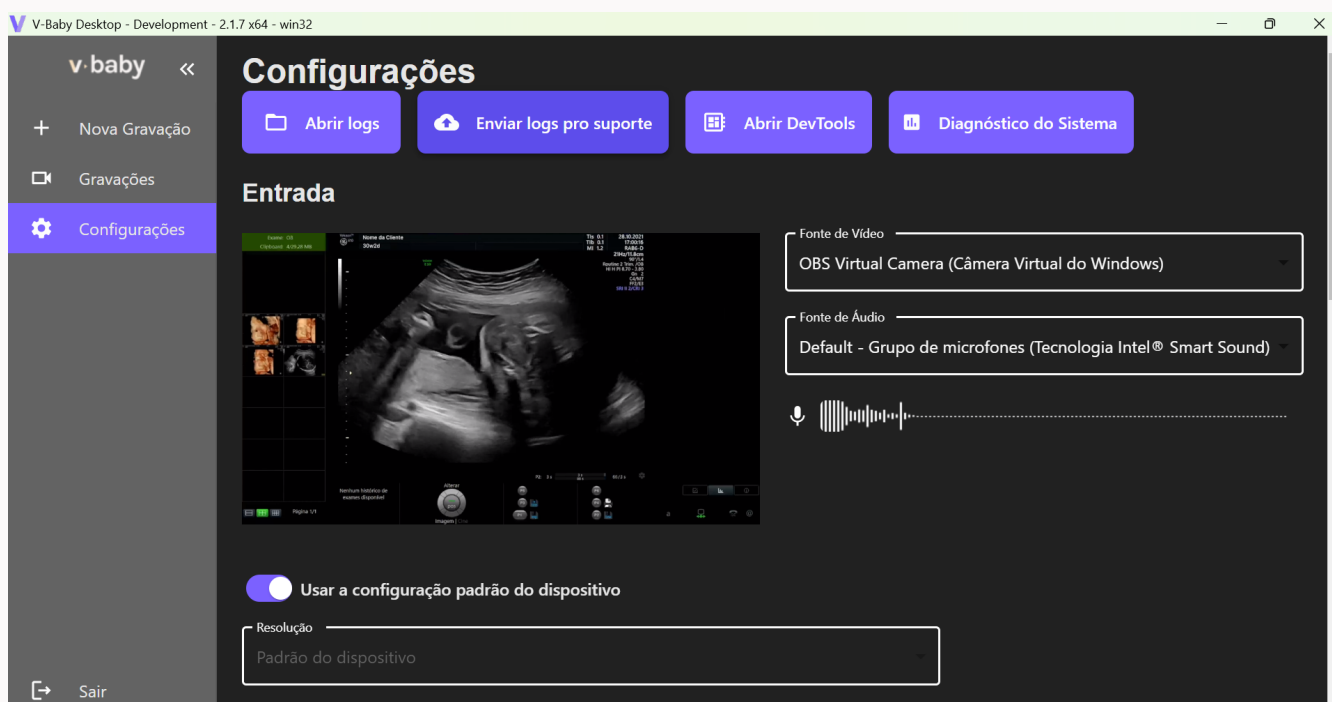


Configurando o V-Baby Desktop

- 1 ▶ Na aba configurações será possível:
 - Acessar o atalho para ver os logs
 - Alterar fonte de vídeo e de áudio
 - Verificar o modulador de áudio para testar se está capturando o áudio do exame

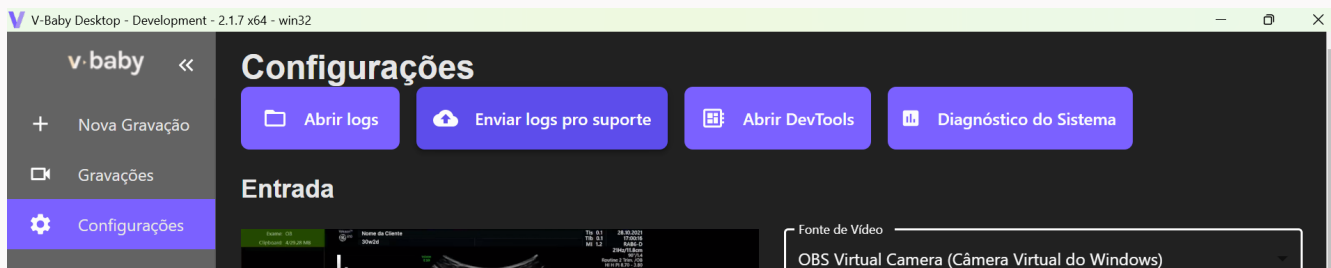


- 2 ▶ Em configurações é possível saber:

- Informações sobre Bitrate (qualidade do vídeo)
- Tamanho da pasta onde os exames foram gravados
- Token de autenticação e a data de expiração
- Mecanismo para garantir que somente as pessoas com aquele TOKEN consigam fazer a requisição para determinada ação
- Logout para desconectar a conta

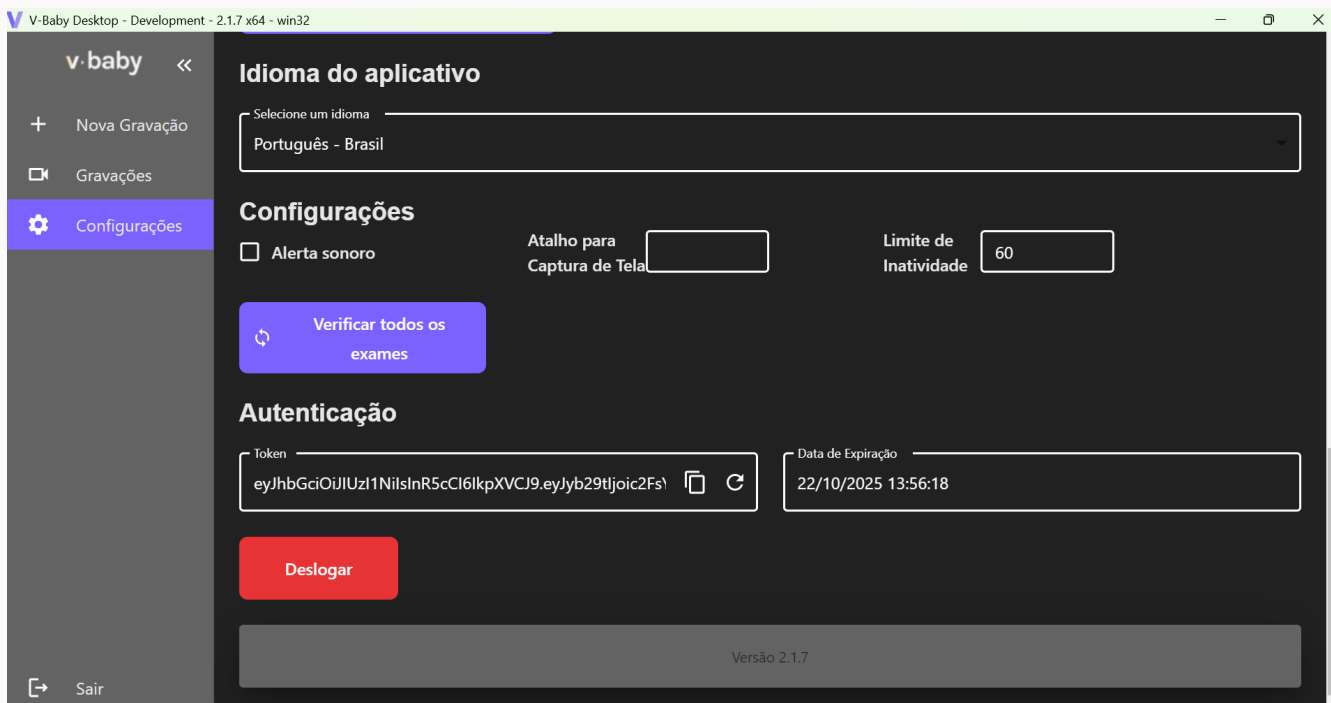

Realizando uma Gravação de exame


- 1 ▶ Clique no menu em **Nova Gravação**
- 2 ▶ Confirme o status da sua conexão
- 3 ▶ Confira a imagem apresentada no painel, estará de acordo com a transmitida pelo seu aparelho de ultrassom
- 4 ▶ Verifique se o modulador de áudio está identificando o áudio para gravação
- 5 ▶ Clique em **Iniciar Gravação**

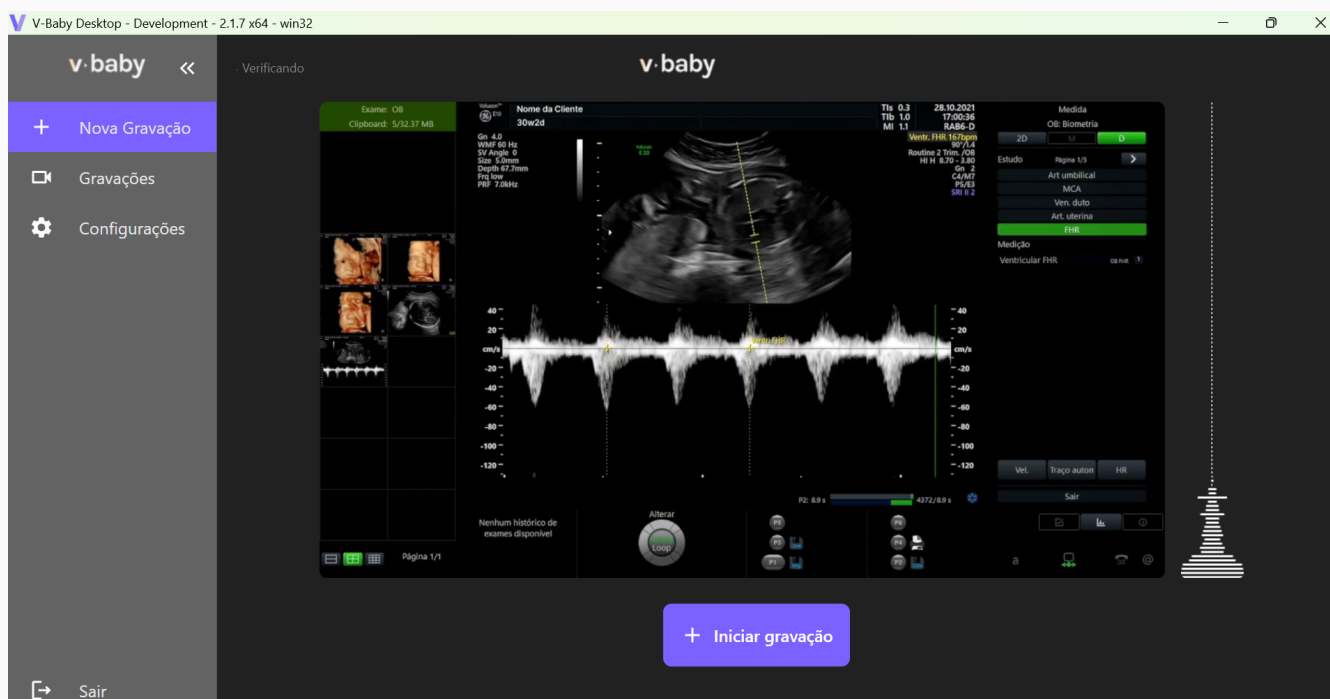

- 6 ▶ Informe o número de telefone do paciente


Importante: É nesse número de telefone que a mãe irá receber um código no Whatsapp para assistir e compartilhar o exame. Ela poderá acessar o exame no aplicativo V-Baby

7 ▶ Clique em Iniciar gravação

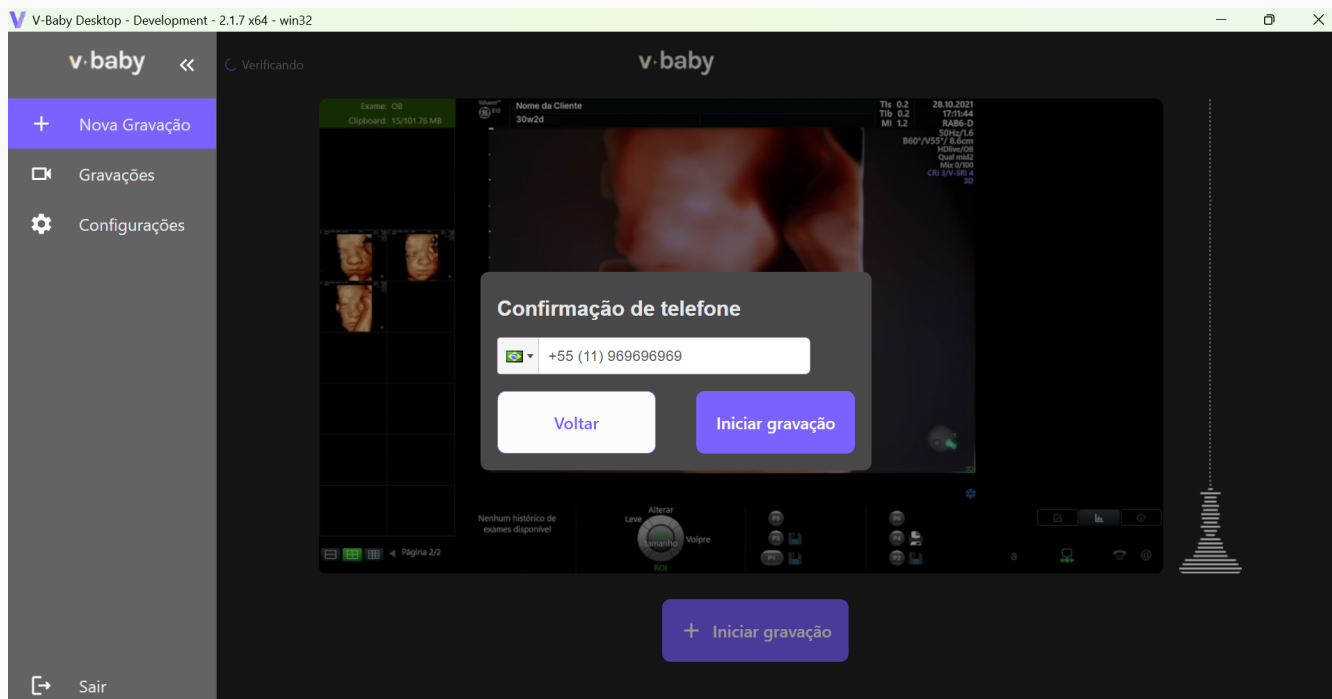


8 ▶ É iniciada a gravação do exame de ultrassom


Atenção: O status da conexão com a internet será sempre apresentado. Caso tenha alguma queda de conexão, o exame é salvo no computador e quando estabilizar a conexão, o exame será enviado por completo para a nuvem Vlab

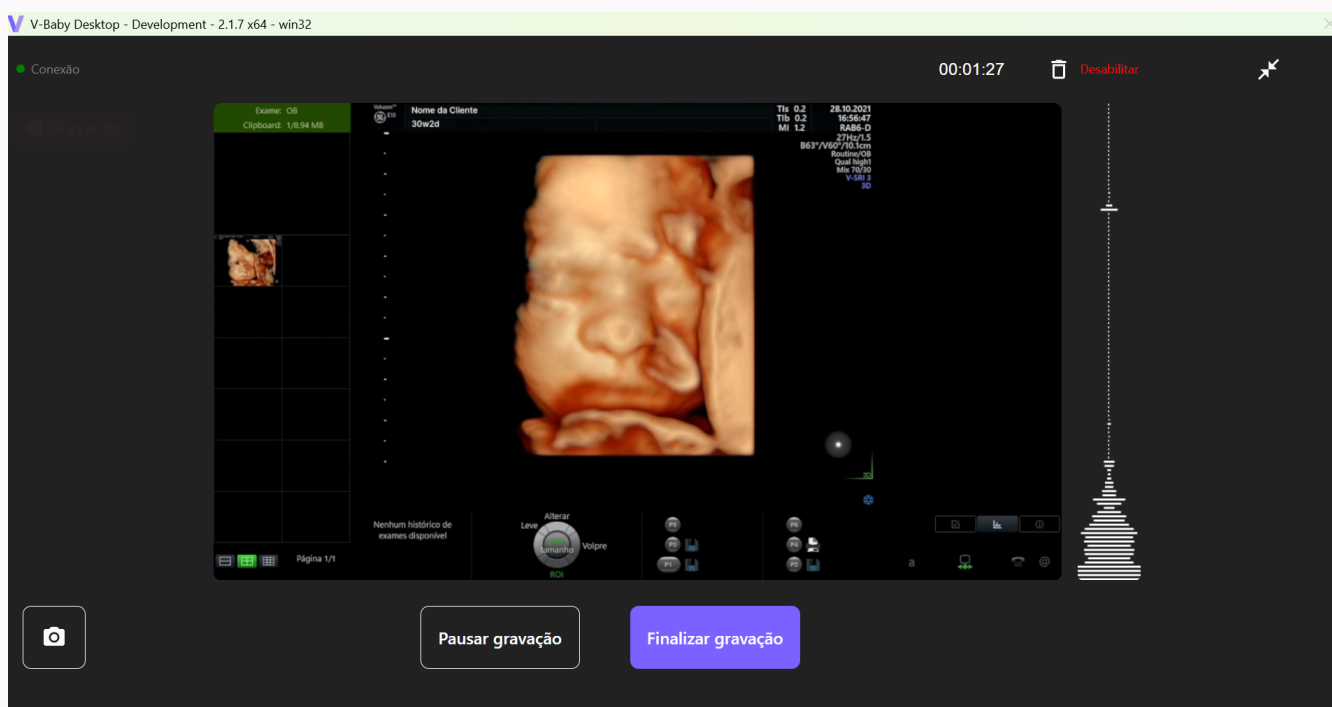


- **Desabilitar exame:** Essa função não exclui o exame, ele fica disponível no dashboard para a clínica, o paciente não terá acesso ao exame através do link enviado no whatsapp

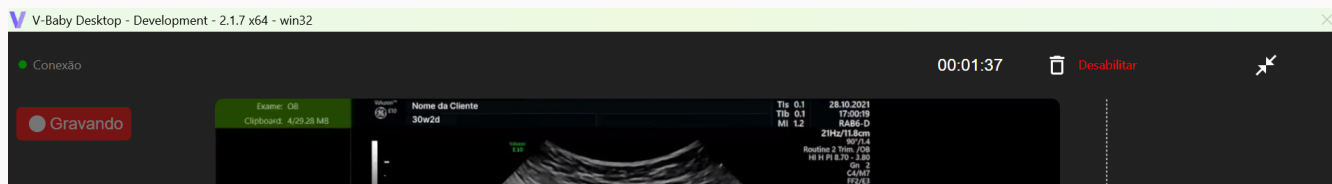

- 10 ► Clique em **Finalizar Gravação** e confirme para encerrar o exame

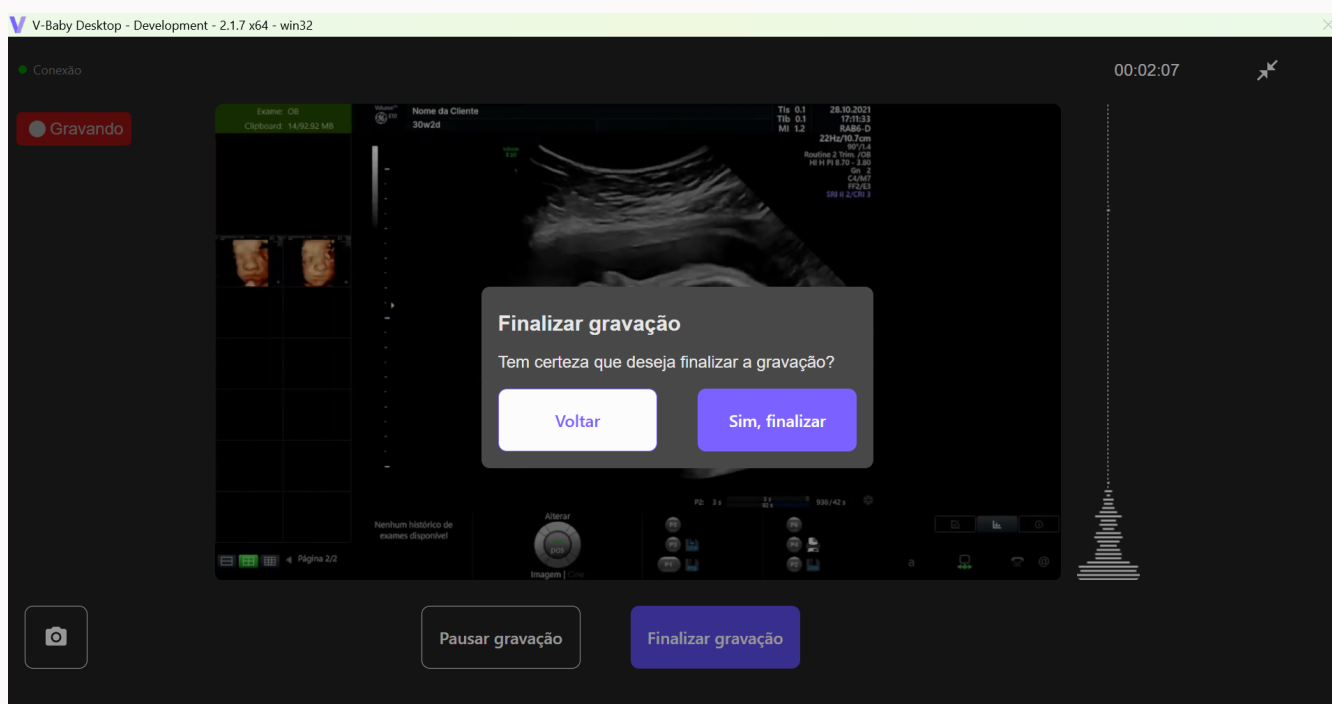


- 11 ► Gravação finalizada! No próximo passo você conhecerá mais detalhes sobre o status do exame

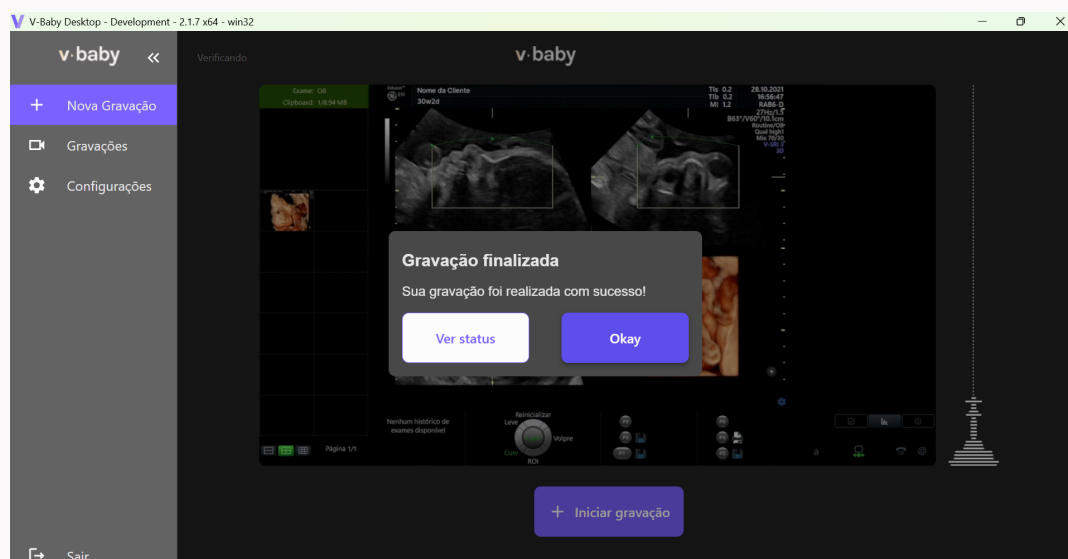

Histórico de Gravações

No menu de nome Gravações, será possível acompanhar todos os exames gravados nos últimos 7 dias. Após 7 dias, o exame é removido da pasta local do computador, mas não se preocupe, o exame está salvo no seu acesso ao Dashboard.

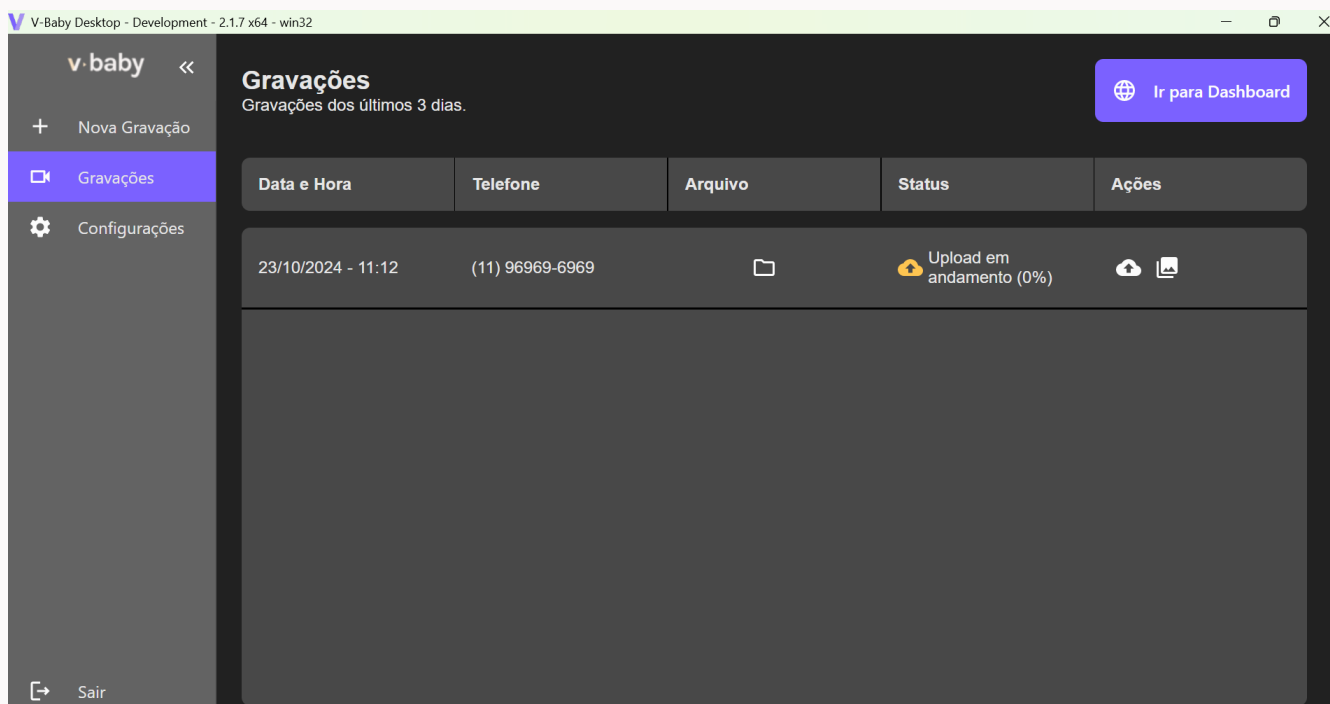

Status de Gravações

Status Concluído: Exame gravado, enviado para a nuvem Vlab e disponível no Dashboard com sucesso

Status Em Andamento: Exame ainda está sendo enviado para a nuvem Vlab

Data e Hora	Telefone	Arquivo	Status	Ações
23/10/2024 - 11:12	(11) 96969-6969		Upload em andamento (0%)	

- V-Baby Desktop - Development - 2.1.7 x64 - win32

v·baby <<

+ Nova Gravação

> Gravações

⚙ Configurações

↪ Sair

Gravações

Gravações dos últimos 3 dias.

Ir para Dashboard

Data e Hora	Telefone	Arquivo	Status	Ações
23/10/2024 - 11:12	(11) 96969-6969		Upload em andamento (0%)	

- 2 ▶** Todos os exames realizados pela clínica ficam disponíveis nesta página

V

FILTROS

Identificador	Unidade	Sala	Data e Horário	Exame
5513981695675	Serenity Rio de Janeiro	Sala 01	12/09/2024 17:20:11	Ver Exame
5511941431616	Serenity Rio de Janeiro	Sala 01	10/09/2024 10:21:44	Ver Exame
5511957699226	Serenity Rio de Janeiro	Sala 01	15/07/2024 17:40:52	Ver Exame
550662294738	Serenity Rio de Janeiro	Sala 01	14/06/2024 14:38:02	Ver Exame
5515997019910	Serenity Rio de Janeiro	Sala 01	07/03/2024 13:46:06	Ver Exame
584142747612	Serenity Rio de Janeiro	Sala 01	07/03/2024 10:49:58	Ver Exame
5511982088890	Serenity Rio de Janeiro	Sala 01	07/03/2024 08:37:25	Ver Exame
5518991430776	Serenity Rio de Janeiro	Sala 01	07/03/2024 08:21:08	Ver Exame
5511989741311	Serenity Rio de Janeiro	Sala 01	07/03/2024 07:56:38	Ver Exame
5511941431616	Serenity Rio de Janeiro	Sala 01	28/02/2024 16:21:24	Ver Exame


10 resultados por página

< 1 2 3 4 5 6 7 8 >

71 resultados

Encerrando a sessão


- ▶ Para encerrar a sessão, clique em **Sair** e confirme

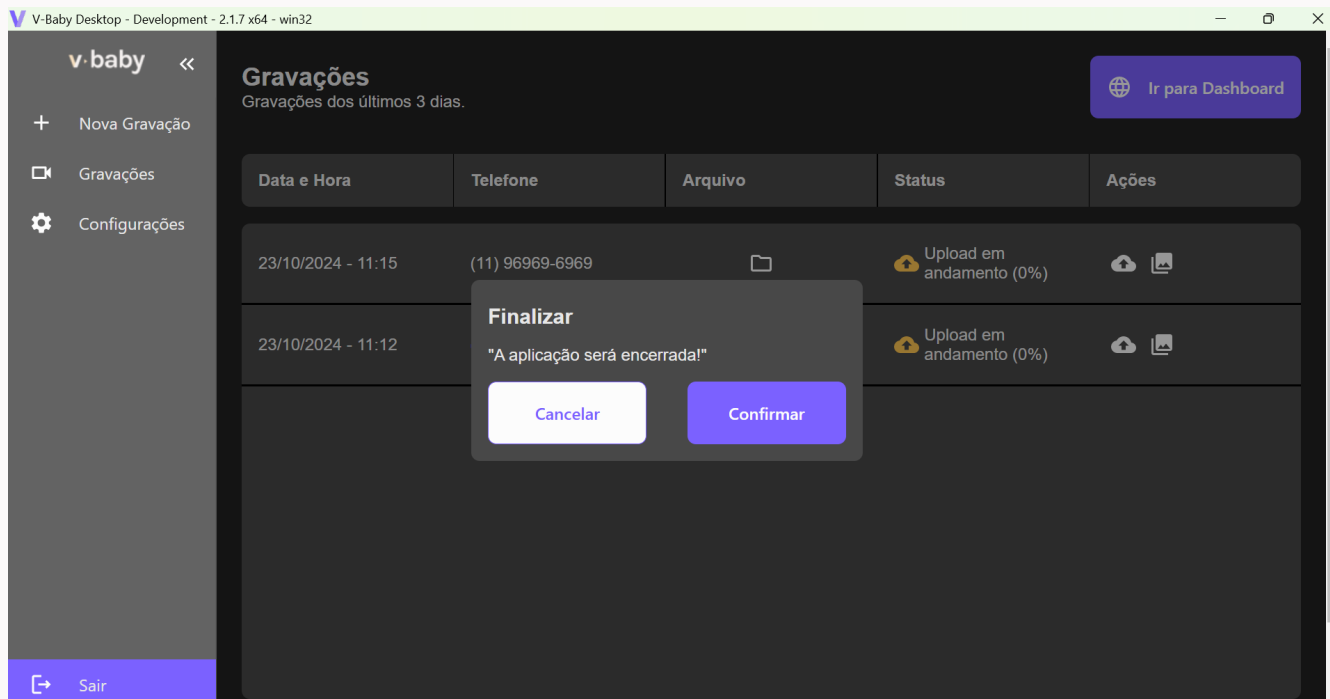

Atualizando o V-Baby Desktop

Sempre que tiver uma atualização do V-Baby Desktop, vamos enviar uma notificação para que confirme e atualize a sua versão. Essa notificação só é enviada quando o seu sistema estiver aberto e conectado a internet.

- ▶ Clique em Reiniciar para que a atualização seja realizada

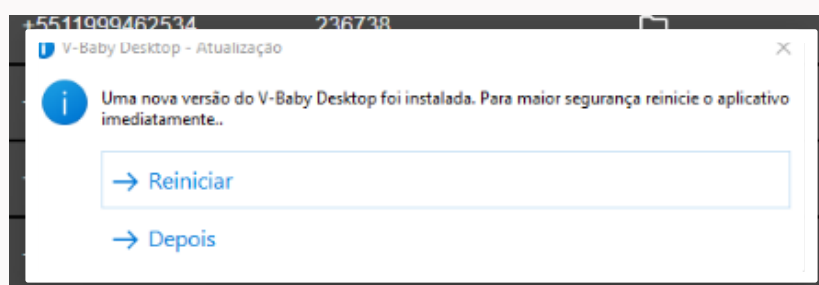

v baby

Desktop



Matriz: Presidente Prudente, SP
R. Beijamiro Batista de Alcântara, 75



+55 11 95320-3002



@vbaby.live



+55 11 2424-5299



www.vlab.live

